




PCEye 5

Guía de inicio

¿Qué se incluye en la caja?

- 1 PCEye 5
- 2 Guía de inicio
- 3 Plato de soporte
- 4 Kit de preparación del plato de soporte
- 5 Documento sobre seguridad y conformidad
- 6 Estuche de transporte
- 7 Adaptador de USB-C a USB-A

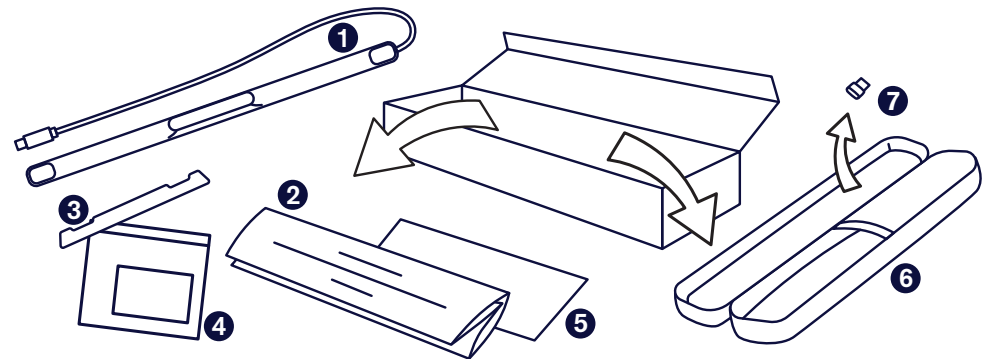


Software

PCEye 5 incluye el software TD Control. Si compró el paquete con Magic EyeFx, vea la tarjeta de licencia para obtener más información.

Conozca su dispositivo.

- 1 Eye Tracker
- 2 Conector USB
- 3 Marcas de instalación
- 4 Imanes de montaje

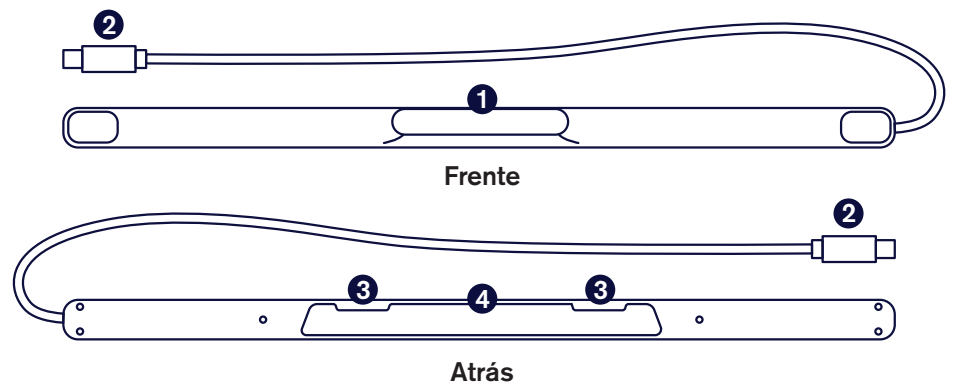

Estamos aquí para ayudar

Centro de aprendizaje

Centro de aprendizaje de Tobii Dynavox:
learn.tobiidynavox.com

Soporte adicional

Comunidad: grco.de/FB-Espanol

Para obtener soporte técnico, comuníquese con su representante local de Tobii Dynavox.

Materiales para capacitación

Manual del usuario: grco.de/PCEyeManual

Manual de TD Control: grco.de/TDCmanual

Tarjetas de entrenamiento de Communicator 5: grco.de/C5Cards

Tarjetas de entrenamiento de Snap Core First de TD:

grco.de/TDSnapCards

Tarjetas de entrenamiento de Snap Texto de TD: grco.de/TextCards

Encuentre recursos adicionales de PCEye 5 aquí:


grco.de/PCEyeHelp



Configuración

Complete los tres pasos de esta guía para descargar el software requerido e instalar el dispositivo PCEye 5 en su computadora. La descarga del software FIRST proporcionará instrucciones en pantalla y lo guiará a través de los pasos de configuración y uso.

Puede usar el PCEye 5 en una computadora portátil o una computadora de escritorio.

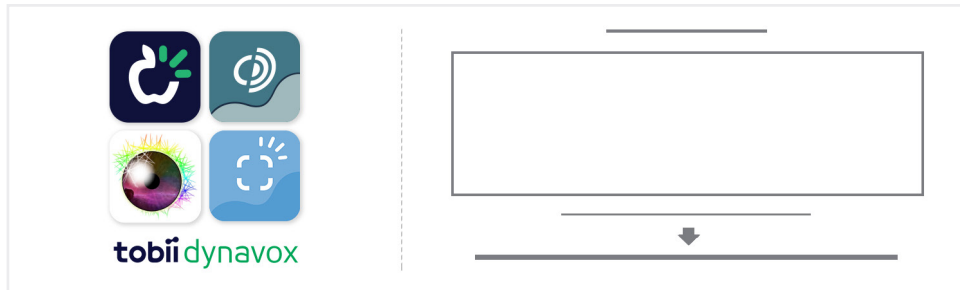

Paso 1: Descargue el software PCEye 5

Vaya a qrco.de/PCEyeCC y descargue el software PCEye 5.

Paso 2: Monte el PCEye 5 y calibre

i Si utiliza PCEye 5 con el soporte opcional PCEye 5, omita este paso y consulte las instrucciones incluidas para obtener información detallada.

Siga las instrucciones en pantalla. Regrese a la guía para obtener más información sobre el software.

Paso 3: Inicie el software

Si compró un paquete de software o recibió tarjetas de licencia adicionales, siga las instrucciones de descarga e instalación en cada tarjeta (ver a la izquierda).

Introducción al software TD Control

Junto con el PCEye 5, TD Control le dará acceso a las funciones del mouse y el teclado. Cuando se abre TD Control por primera vez, la Guía de inicio rápido proporcionará una descripción general de las diferentes acciones.

i Puede regresar a la Guía de inicio rápido si selecciona el botón Información.

Seleccione Ocultar guía para salir.

Explorar la función Seguimiento

El Seguimiento le brindará comentarios sobre dónde está viendo en la pantalla. Cuando fije la mirada en un elemento, aparecerá el botón Activador. Al fijar la mirada en el botón Activador, se abrirá el menú de interacciones.



Explorar el menú de interacciones

El menú de interacciones proporciona acceso al teclado y a las funciones principales del mouse.


i Para ver una descripción detallada de cada función, consulte el Manual del usuario.

Explorar el menú Área oculta

El menú Área oculta le da acceso a funciones adicionales, como Clic continuo, Configuración, Pausa, etc.

Para recalibrar, acceda al menú Área oculta, seleccione Más y luego seleccione Calibración rápida.

i A medida que explora el TD Control, puede volver a calibrar si su precisión no es óptima.

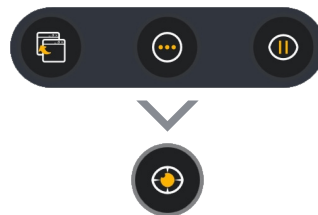

Consejos útiles para usar TD Control

- Use Descansar cuando necesite descansar sus ojos.
- El elemento deseado no necesita estar perfectamente colocado en el centro del Seguimiento.
- Para incrementar la precisión, use Ajustar objetivo.



Pausa



Ajustar el objetivo

- Cuando utilice el Desplazamiento, cuanto más lejos del icono de desplazamiento estén mirando sus ojos, más rápido este irá. El Desplazamiento funciona hacia arriba, abajo y de lado a lado.
- Para escribir en campos de texto, coloque el Seguimiento en el campo de texto y luego seleccione Teclado. No es necesario hacer clic izquierdo.