


Snap Core First

Tarjetas de entrenamiento

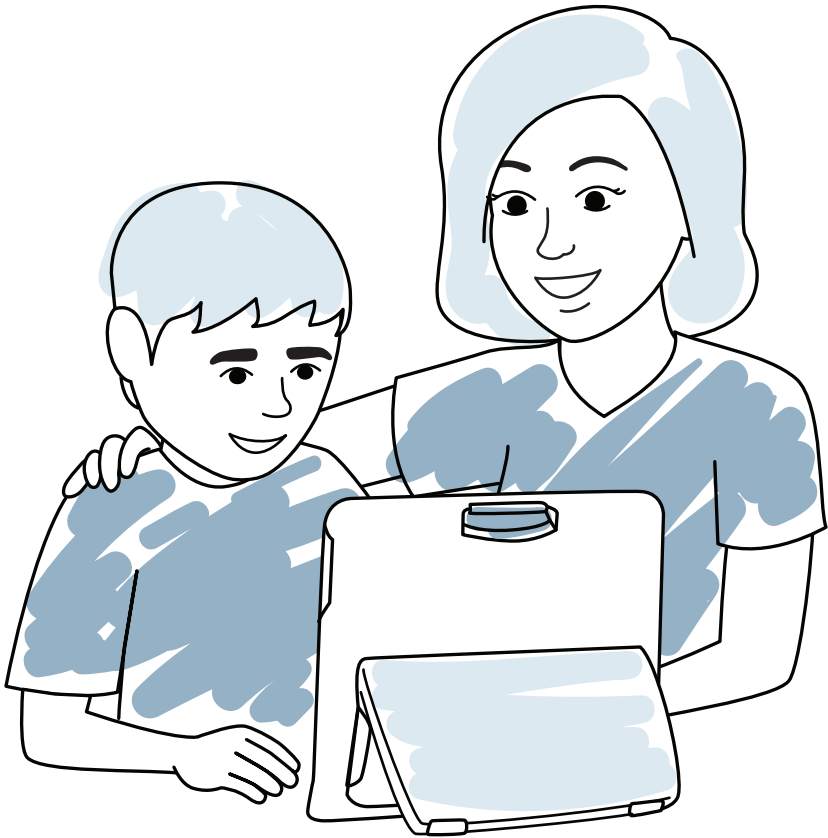

Estas son sus tarjetas de entrenamiento Snap Core First. Le ayudarán a comenzar a integrar su dispositivo en su vida diaria y le presentarán algunas ediciones básicas.


Contenido

- 1 Códigos QR y preguntas frecuentes
- 2 Cuidado del dispositivo y configuración de Snap Core First
- 3 Glosario de Snap Core First
- 4 Usar CAA
- 5 Usémoslo e información importante
- 6 Actividades: Leer un libro y jugar un juego
- 7 Actividades: Mirar deportes e ir a un restaurante
- 8 Botón de búsqueda y cambiar el tamaño de la cuadrícula
- 9 Editar un botón y editar apoyos de comportamiento
- 10 Compartir y guardar sus páginas
- 11 Pathways para Core First y Core First Learning
- 12 myTobiiDynavox.com y soporte adicional



Códigos QR

Usamos códigos QR para que pueda tener acceso rápido a información como videos sin tener que escribir direcciones web. Escanee el código QR con la cámara de su teléfono inteligente para ver la información vinculada.

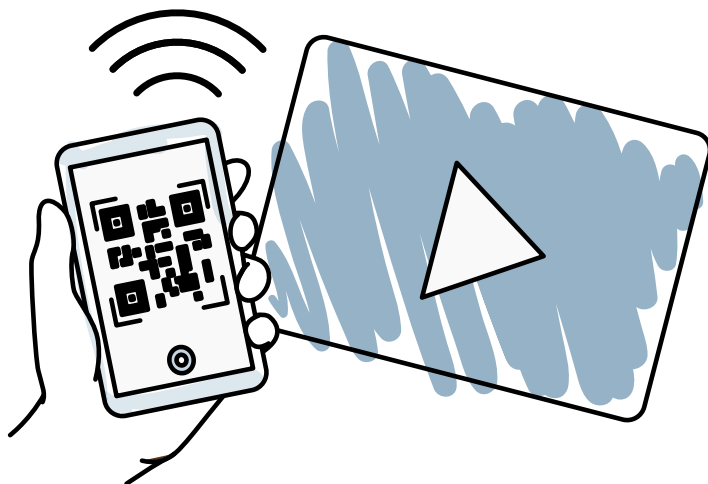

Usuarios de Android

Descargue una aplicación gratuita de lector de códigos QR de la tienda Google Play. Busque "escáner QR" o "lector QR" para encontrar opciones.

Usuarios de Windows

Descargue una aplicación gratuita de lector de códigos QR de la tienda de Windows. Busque "escáner QR" o "lector QR" para encontrar opciones.

Usuarios de iOS

Si tiene iOS 11, abra la cámara del teléfono y apúntela hacia el código QR. Toque la notificación que aparece.

Si no ha actualizado a iOS 11, descargue una aplicación de escáner de código QR. Existen numerosas aplicaciones gratuitas en la tienda de aplicaciones.



Preguntas frecuentes

¿La CAA evitará que una persona hable?

No. De hecho, hay una década de investigación que indica que la CAA no interfiere con el uso o el desarrollo del habla natural.

¿La CAA es útil para las personas que tienen alguna capacidad en el habla?

Sí. La CAA contribuye a que las personas con discapacidades del habla alcancen su máximo potencial al conversar independientemente con interlocutores tanto familiares como desconocidos.

¿Existe alguna solución si una persona tiene una discapacidad física y no puede tocar un dispositivo de comunicación?

Sí. Hay diversas formas en que una persona puede hacer selecciones en un dispositivo de CAA. Esto a menudo se conoce como el método de acceso. Las personas que no pueden tocar el dispositivo de comunicación pueden usar la mirada, indicar con la cabeza, o usar el mouse o escaneo como su principal modo de selección.

¿Puede alguien ser demasiado joven o estar demasiado incapacitado para usar la CAA?

No. Nunca se puede ser demasiado joven ni demasiado incapacitado para mejorar la comunicación.

La CAA impacta positivamente el desarrollo del lenguaje, la cognición y las habilidades de alfabetización, así como la participación en entornos sociales, educativos y de juego.

Escanee este código para obtener más preguntas y respuestas comunes.



Escanee este código para ver un video sobre métodos de acceso en dispositivos de alta tecnología.



Cuidado del dispositivo

Nuestros dispositivos están contruidos de manera diferente a las computadoras portátiles o tabletas normales.

Han sido fabricados para garantizar su durabilidad, gracias a un rápido disco duro de estado sólido que soporta impactos y una clasificación IP54 que ratifica su resistencia probada a la humedad y el polvo. Además, la pantalla está hecha de Gorilla Glass™ resistente al daño.

Siéntase libre de llevar su dispositivo a donde quiera que vaya, y confíe en su durabilidad.

¿Usa su dispositivo bajo lluvia ligera?

¡No hay problema! Su dispositivo está diseñado para soportar salpicaduras de agua. Asegúrese de que las cubiertas de los puertos estén en su lugar cuando esté fuera de casa y eso le dará tiempo para salir de la lluvia.

¿Usa su dispositivo en la cena?

No hay problema. Simplemente limpie la pantalla con un paño húmedo si es necesario.



Cuidar su dispositivo es importante y fácil de hacer.

Cuidado del cable:

- Al cargar el dispositivo, manténgalo cerca de la toma de corriente para evitar jalar accidentalmente los cables y conectores.
- El cable de alimentación no debe enredarse, retorcerse o enrollarse firmemente alrededor de nada.

Limpieza:

- Antes de limpiar el dispositivo, apáguelo y desenchufe todos los cables.
- Se pueden usar toallitas antibacterianas.
- Limpie solo las superficies externas y permita que el producto se seque naturalmente.





No utilice productos en aerosol que puedan saturar el dispositivo.



Configurar Snap Core First

- 1 Abra Snap Core First.
- 2 El asistente de configuración del usuario se inicia cuando abre Snap Core First por primera vez.
- 3 Inicie sesión en myTobiiDynavox ahora o más tarde.
- 4 Escriba el nombre de la persona que usará Snap Core First.
- 5 Elija una voz.
- 6 Elija un tamaño de cuadrícula al que el usuario pueda acceder con precisión y que proporcione la mayor cantidad de botones para el vocabulario.

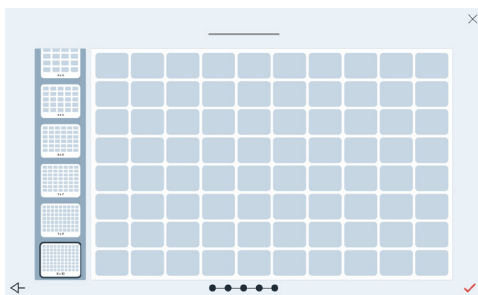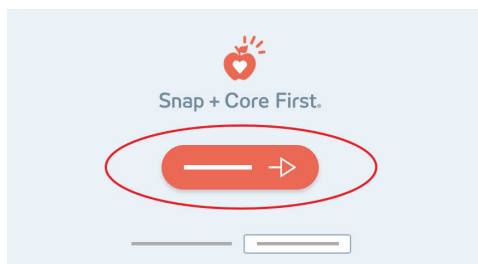

Consejos útiles para seleccionar un tamaño de cuadrícula

Las cuadrículas más pequeñas, 1x1 a 2x3, no están destinadas a ser usadas a largo plazo. Son simplemente páginas de práctica iniciales que no le dan al usuario la capacidad de navegar entre páginas.


De hecho, el usuario debe moverse rápidamente a un tamaño de cuadrícula (al menos 3x3) que le permita explorar la navegación. Siempre puede respaldarlo si es necesario. Esto también le permitirá modelar las opciones correctas de navegación y vocabulario para el usuario.



Glosario de Snap Core First


Vocabulario núcleo

Un pequeño conjunto de palabras de uso frecuente que se pueden combinar para crear mensajes únicos.

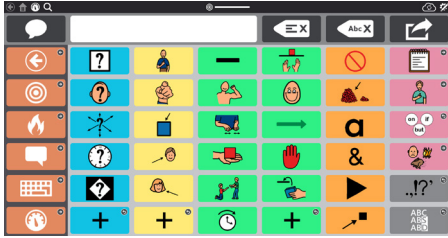

Charla rápida

Pequeñas palabras y frases que se utilizan en entornos cotidianos para mantener la conversación, llamar la atención o comentar.

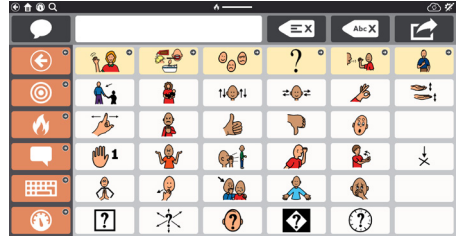


Temas

Mensajes prealmacenados, organizados por intención comunicativa, relacionados con una situación o entorno específicos.




Barra de herramientas

La Barra de herramientas es donde se encuentran todas las herramientas de comunicación. Encuentre herramientas como Vocabulario núcleo, Temas y Charla rápida desde aquí.

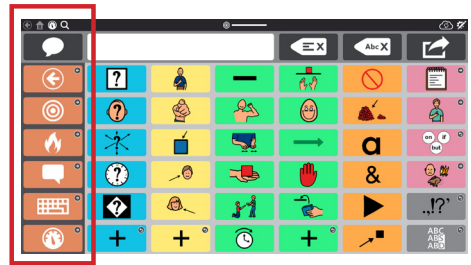

Listas de palabras y Palabras del tema

Las listas de palabras están organizadas por categoría (p. ej., comida, mascotas, etc.). Las Palabras del tema se organizan por categoría y se relacionan con un tema específico.

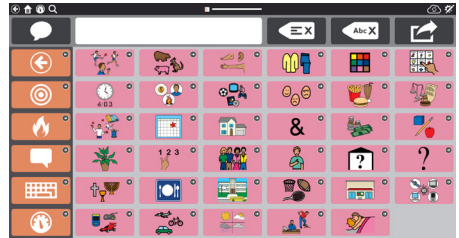


Glosario de Snap Core First



Apoyos de comportamiento (que se encuentran en cada Tema)

Primero... luego

Muéstrele a una persona lo que sucederá primero y lo que sucederá después.

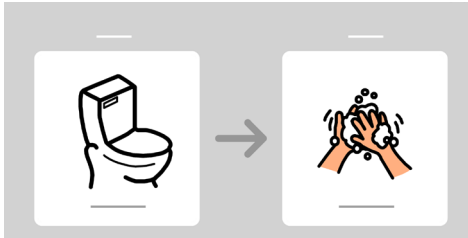


Minihorarios

Muestra el orden de un pequeño conjunto de actividades.




Narrativa social (guion)

Historias que describen una situación y reconocen cómo una persona puede sentir y manejarla de manera positiva.

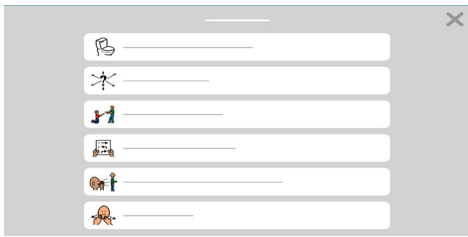


Temporizador visual

Muestra cuánto tiempo queda en una actividad.

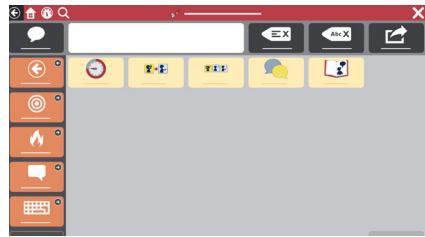

Cuadro de mandos

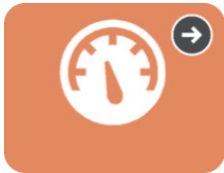

El Cuadro de mandos contiene controles del dispositivo, como volumen y controles remotos. Puede acceder a él desde la barra de herramientas.

Herramienta de edición



Realiza cambios en el contenido o la configuración.



Usar CAA

Usar CAA significa proporcionar oportunidades para que las personas participen y se involucren en actividades cotidianas. El primer paso para una ejecución exitosa es ser un gran interlocutor. Las habilidades del interlocutor son técnicas que puede usar para ayudar al comunicador a ser más efectivo.

Reconocer oportunidades

Identifique momentos durante el día en que una persona puede aprender y practicar habilidades de comunicación. Por ejemplo, ayúdela a usar Snap Core First para comunicar el bocadillo de su preferencia o la película que desee ver.



Crear un entorno de comunicación positivo

Adopte estas actitudes y estrategias que fomentan la comunicación.

- **Asuma la competencia**
"Sé que puedes hacerlo".
- **Concéntrate en el uso, no en las pruebas**
En lugar de decir: "Buscar libro", diga: "Es hora de lectura. ¿Qué libro deberíamos leer?".
- **Responda a todos los modos de comunicación**
Estudiante: Le sonrío.
Interlocutor(a): "Bueno, ¡hola a ti también!".
- **Espere**
El interlocutor cuenta hasta cinco antes de proporcionar ayuda para localizar el vocabulario.

Escanee este código para ver un video sobre la creación de un entorno de comunicación positivo.



Usar CAA

Modelado

Se ha comprobado que el modelado es la mejor manera de enseñar a las personas a comunicarse con CAA. El modelado implica tocar y usar el dispositivo mientras habla e interactúa con la persona.

- EL modelado consiste en mostrarle a la persona cómo comunicarse.
- No requiere imitación.
- Demuestre palabras clave en lugar de cada palabra que diga.
- Demuestre mientras busca el vocabulario.
- Los errores están bien. Estos le dan la oportunidad de demostrar cómo corregirlos.
- El modelado no es examinar o probar.



Buscar el éxito

Buscar el éxito no es solo que la persona comunique lo que usted espera, cuando lo espera y como lo espera.

El éxito puede incluir:

- Mayor atención a las interacciones
- Mayor gozo de las interacciones
- Inicio de la comunicación
- Más independencia en la comunicación
- Uso de más vocabulario
- Interacciones más largas

Escanee este código para ver un video que muestre como modelar.



Escanee este código para ver un video sobre la búsqueda del éxito.



¡Usémoslo!

¡Felicitaciones! Pongamos manos a la obra y hablemos sobre cómo usar Snap Core First en su vida cotidiana.

Hemos creado cuatro actividades para que comience. Elija actividades que sean motivadoras y que sigan siendo atractivas. Siéntase libre de repetir actividades, ya que la repetición contribuye al aprendizaje.



¡No cometa estos errores de principiante!


- No necesita crear algo desde cero. Hemos construido el marco. Familiarícese con lo que hay en Snap Core First y luego personalícelo para el usuario.
- No se presione demasiado, ni presione demasiado al usuario. Completar cada tarea con precisión al principio no es una meta realista. Está bien cometer errores. Use los consejos que brindamos en la tarjeta n.º 4: "Usar CAA" para proporcionar oportunidades para que la persona participe y se involucre.

Para obtener objetivos más detallados y planes de lecciones, revise la tarjeta n.º 11: Pathways para Core First y Core First Learning.



Actividad

Leer un libro

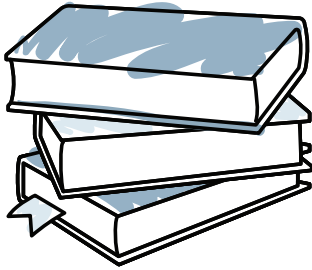

Materiales

Tema de lectura de
Snap Core First

Un libro favorito

Un lugar cómodo

Preparación

Seleccione Temas en la Barra de herramientas. Localice el Tema de lectura y revise el vocabulario antes de comenzar la actividad.



Pasos



- 1 Presente el libro y muestre la portada. Discuta de qué se tratará el libro.
- 2 Lea cada página y haga una pausa al final para permitir oportunidades de comunicación.
- 3 Mientras lee, haga pausas para hacer comentarios y preguntas (p. ej., "¿Qué te parece hasta ahora? ¿Da miedo? Creo que el niño estaba asustado".).
- 4 Una vez que termine de leer el libro, no examine; en lugar de eso, pregúntele cómo se sintió o qué pensó sobre la historia.



Sugerencias útiles

- Si hay una oración repetitiva en la historia y tiene un botón vacío en la página, programe la oración en el botón.
- Seleccione el botón siempre que aparezca la oración repetida.
- Mensajes como "Dar vuelta a la página" y "Leer de nuevo" ya están programados en su dispositivo.
- Comente todo lo que el niño mira o señala en el entorno. Cuando termine, refuerce lo bien que se comunicó con usted.
- Revise el libro nuevamente, enfocándose en las imágenes. Observe las palabras en el dispositivo que coincidan con las imágenes y demuestre seleccionándolas.



Actividad

Jugar un juego



Ideas de juegos

Pesca, Guerra, Bingo, Memoria, Candyland

Preparación

Seleccione Temas en la Barra de herramientas. Localice el Tema de juegos y revise el vocabulario antes de comenzar la actividad.



Materiales

Tema de juegos de Snap Core First

Un juego de mesa o de cartas favorito

Bocadillos (opcional)

Pasos



- 1 Introduzca el juego y repase las reglas si no ha jugado antes.
- 2 Comience a jugar con el vocabulario que revisó.
- 3 Haga pausas para comentar cómo va el juego.
- 4 Una vez que el juego haya terminado, tómese tiempo para hacer comentarios.



Sugerencias útiles

- Consulte la carpeta Palabras del juego en Palabras del tema para obtener más palabras de vocabulario.
- Mensajes como "Mi turno", "Jugar de nuevo" y "No me gusta este juego" ya están programados en su dispositivo.
- Haga que el usuario realice un seguimiento del turno de todos (mi turno, tu turno) seleccionando los botones apropiados.



Actividades

Ver deportes



Materiales

Tema de deportes de Snap Core First

Un evento deportivo favorito

Bocadillos (opcional)

Preparación

Seleccione Temas en la Barra de herramientas. Localice el Tema de deportes y revise el vocabulario antes de comenzar la actividad.



Pasos



- 1 Presente el evento deportivo que está viendo y revise qué equipos están jugando.
- 2 Demuestre cómo navegar y activar botones para hacer comentarios divertidos durante el juego.
- 3 Cuando termine la actividad, revise cualquier intento de comunicación exitoso (p. ej.: "Realmente me gustó cómo señalaste la pelota para mostrarme que te gustaba".).



Sugerencias útiles

- Use el botón editar para agregar su equipo favorito al botón que dice "Equipo favorito []".
- Mensajes como "¿Hay un juego hoy?", "Me encanta este equipo" y "Apestan" ya están programados en su dispositivo.
- Si tiene un botón vacío, programe un grito de aliento divertido para su equipo.



Actividades

Ir a un restaurante



Materiales

Tema de restaurantes de Snap Core First

Un restaurante favorito

Comida deliciosa

Preparación

Seleccione Temas en la Barra de herramientas. Localice el Tema de restaurantes y revise el vocabulario antes de comenzar la actividad.



Pasos



- 1 Comente sobre ir al restaurante.
- 2 Puede comenzar a demostrar el vocabulario antes de llegar al restaurante. Por ejemplo, seleccione el botón "Salgamos a cenar".
- 3 Una vez que esté en el restaurante, demuestre con el dispositivo durante toda la comida.
- 4 Una vez que haya terminado su comida, revise cualquier intento de comunicación exitoso (p. ej.: "¡Cuando presionaste 'más' supe que debía pasarte los bollos!").




Sugerencias útiles

- Mensajes como "¿Podemos comer fuera?", "Me encanta este lugar" y "No veo nada de lo que quiero aquí" ya están programados en su dispositivo.
- Anime a todos en la mesa a participar, incluidos los camareros.




Buscar una palabra

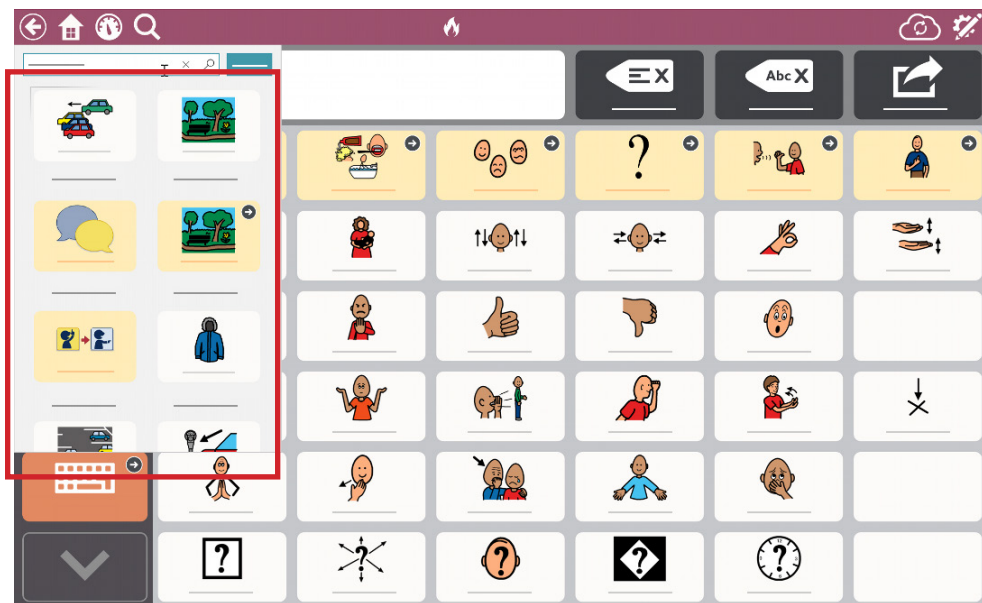

Escanee este código para obtener más información sobre la función de búsqueda.



-  Seleccione la herramienta Buscar.
- Seleccione el cuadro de texto y escriba la palabra que desea buscar.
- De la lista de opciones, seleccione el resultado deseado.
- Siga la ruta resaltada para encontrar su palabra o frase.



Cambiar los tamaños de la cuadrícula


Recomendamos priorizar la capacidad del usuario para seleccionar botones con precisión. El acto de acceder físicamente al dispositivo de comunicación requiere práctica. Comience con un tamaño de cuadrícula más pequeño. A medida que el usuario se vaya acostumbrando a usar el dispositivo, podrá usar tamaños de cuadrícula más grandes. Cambiar el tamaño de la cuadrícula es fácil y el conjunto de páginas de Core First está diseñado para mantener la ubicación del vocabulario uniforme en todos los tamaños de cuadrícula.

Escanee este código para ver un video corto sobre cómo cambiar el tamaño de la cuadrícula.



1  Seleccione el botón Editar.

2 Seleccione la pestaña Conjunto de páginas.

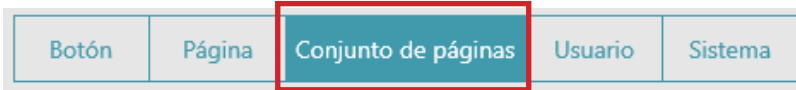


3 Seleccione Tamaño de cuadrícula.



4 Haga una selección de los Tamaños de cuadrícula optimizados.

5 Seleccione Listo.

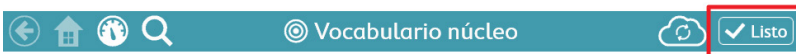


Editar un botón

1 Diríjase a la página con el botón que desea editar.

2  Seleccione Editar.

3 El panel de edición aparecerá en la parte inferior de la pantalla. Observe que "Botón" ya está resaltado.

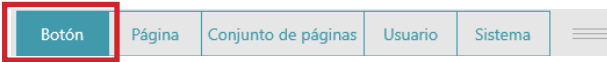

4 Seleccione el botón que desea editar.

5 Para cambiar el símbolo del botón:

 Seleccione el botón Buscar para encontrar un símbolo.

 Seleccione el botón Cámara para agregar una foto.

6 Para cambiar el texto que aparece en el botón, escriba en el campo Etiqueta. Para cambiar el Mensaje que se inserta o se pronuncia cuando se selecciona el botón, escriba en el campo Mensaje.

7 Seleccione Estilo para cambiar el color, el borde, la fuente o el diseño del botón.

8 Edite las Acciones para cambiar lo que sucede cuando se selecciona el botón.




9 Cuando termine, seleccione Listo.

Escanee este código para obtener más información sobre los botones de edición.



Editar los apoyos de comportamiento

- 1 Busque la página Apoyos que contiene el apoyo de comportamiento por editar.
- 5 Seleccione el ícono de lápiz en cualquier fila para realizar cambios.

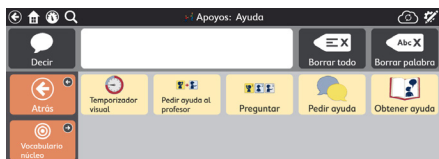

- 2 Seleccione Editar.



- 6 Seleccione el botón Vista previa en la parte inferior del panel de edición de soporte para obtener una vista previa de sus cambios en el Soporte de comportamiento.

- 3 Seleccione el botón cuyo apoyo desee editar.



- 7 Cuando termine, seleccione Listo.

- 4 Seleccione la acción (Minihorario, Temporizador visual, Primero... Luego, o Guion).



Compartir y guardar sus páginas: sincronización

La sincronización le permite:

- Usar la misma versión del Conjunto de páginas en varios dispositivos
- Compartir el Conjunto de páginas con otros
- Editar de forma remota
- Guardar su Conjunto de páginas en la nube con un solo clic

A diferencia de la copia, las páginas sincronizadas están conectadas entre sí a través de una versión actualizada en la nube.

Cuando selecciona Sincronizar, envía los cambios que ha realizado a la nube y recibe los cambios que otros han realizado.

Cuando todos los dispositivos conectados se han sincronizado, todos tienen la misma versión del Conjunto de páginas.



Este es su botón de sincronización. Se encuentra en la barra superior de Snap Core First.



Compartir y guardar sus páginas: guardar en un archivo

Se puede hacer una copia de seguridad de su usuario Snap y sus páginas en un archivo. Estos archivos se pueden almacenar y compartir en myTobiiDynavox.com, o puede guardarlos localmente en su dispositivo o USB.




Sincronizar

La sincronización es más útil cuando el usuario alterna entre múltiples dispositivos. Quizás tenga un dispositivo en la escuela y otro dispositivo en casa. Sincronice el Conjunto de páginas entre los dos dispositivos para garantizar la uniformidad.

La sincronización también se puede utilizar para editar de forma remota, sin molestar al usuario. Por ejemplo, el usuario puede continuar usando su dispositivo de comunicación mientras usted edita el Conjunto de páginas en su PC. Sincronice en la PC, y luego sincronice en el dispositivo de comunicación para recibir los cambios.

La sincronización también se puede utilizar como un método de respaldo conveniente para un solo dispositivo. Cada vez que sincroniza, crea una copia de seguridad en la nube.

¿Sincronizar o
guardar en un archivo?

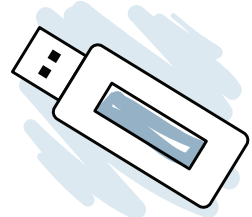

Guardar en un archivo

Guardar en un archivo es mejor para compartir con personas que desean realizar sus propios cambios, separados de usted, y cuando solo desea guardar o compartir un par de páginas, no un Conjunto de páginas completo.

Guardar en un archivo es excelente para momentos en que no tiene conexión a internet. Cree un archivo de respaldo para usted o póngalo en una unidad USB para compartirlo con otra persona.

Guardar en un archivo es la única forma de hacer una copia de seguridad de un usuario, incluidas todas sus configuraciones.



Pathways para Core First

Pathways para Core First es una aplicación complementaria GRATUITA que brinda orientación experta sobre cómo involucrar a los usuarios de Snap Core First.



Pathways lo lleva paso a paso a través de las habilidades que lo ayudan a maximizar los beneficios de la comunicación CAA con Snap Core First.

- Configurar Core First
- Personalizar Core First aprendiendo a editar
- Probarlo con actividades divertidas
- Desarrollar habilidades de comunicación
- Desarrollar habilidades operativas
- Desarrollar habilidades sociales
- Fomentar el comportamiento positivo
- Identificar objetivos con nuestra cuadrícula de objetivos
- Aprender los mejores consejos para fomentar el crecimiento
- Seguir el progreso



Escanee este código para obtener más información sobre Pathways para Core First:



Core First Learning

¿Qué es Core First Learning?

Un programa de comunicación basado en la web que apoya el desarrollo del lenguaje, la comunicación y la alfabetización.

Enseña el significado, el uso y la ubicación de palabras núcleo en los sistemas de CAA.

¿Cómo lo consigo?

Existen dos formas de acceder a Core First Learning

En la aplicación de Pathways para Core First:

- Seleccione Desarrollar habilidades.
- Seleccione Enseñar el vocabulario núcleo.

Para obtener versiones imprimibles de todas las lecciones y libros, escanee este código.





¡Su cuenta gratuita myTobiiDynamovox.com le brinda acceso a numerosos beneficios que incluyen almacenamiento en la nube para copias de seguridad, sincronización y uso compartido de páginas, planes de lecciones y más!

myTobiiDynamovox.com



Unirse a myTobiiDynamovox le permitirá hacer lo siguiente:

- Hacer una copia de seguridad de su sistema de forma segura
- Descargar herramientas y recursos gratuitos
- Revisar los planes de lecciones gratuitas de Core First
- Conocer las actualizaciones disponibles
- Acceder a soporte técnico y preguntas frecuentes
- Compartir Conjuntos de páginas y Paquetes de páginas



Soporte adicional

Comunidad: bit.ly/FBComES

Soporte técnico:

Norteamérica: 1-800-344-1778 ext. 1

Resto del mundo: +46 8 522 950 20 ext. 1

#PowerToBeYou

#12007986 Tarjetas de entrenamiento Snap CF de Tobii Dynavox v.1.0 - es-MX

